

Mölnlycke® Z-Flo™ Fluidized Positioner – Positionieren für bessere Ergebnisse

Für Erwachsene und Kinder



Verfügbare Patientenlagerungshilfen

Die Patientenlagerung ist ein Eckpfeiler der Prävention und Behandlung von Druckulzera. Doch die herkömmlich verfügbaren Lagerungshilfen sind mehr als ungeeignet.

Mögliche Nachteile von Decken, Kissen und Keilen zur Patientenlagerung:

- Fehlende Druckumverteilung
- Schwierigkeiten bei der Bestimmung der gewünschten Position
- Keine dauerhafte Stabilität in der gewünschten Position
- Ungenügende Formbarkeit zum Schutz empfindlicher Bereiche

Dauerhafter Schutz durch Druckumverteilung und fortwährende Positionierung

Der Mölnlycke Z-Flo Fluidized Positioner ist form- und modellierbar und lässt sich so perfekt an die Anatomie des Patienten anpassen. Dadurch wird eine Druckumverteilung erreicht. Er kann an die individuellen Lagerungsanforderungen angepasst werden und stabilisiert die gewünschte Position über einen längeren Zeitraum.

In den Positioner können **Aushöhlungen und Vertiefungen** für medizinische Kabel, Schläuche und bestehende Wunden **modelliert** werden.



Legen Sie den Z-Flo unter den Kopf und passen Sie ihn an die Oberseite der Schultern an.



Bringen Sie den Z-Flo in die gewünschte Form. Passen Sie ihn dabei an die Form des Kopfes an und achten Sie darauf, dass der Bereich unter der Halswirbelsäule ausgefüllt ist.



Positioner in der gewünschten Position – ermöglicht **Lagerung und Druckentlastung.**

Mölnlycke® Z-Flo™ auf der IPS (Intensivpflegestation)

Der Mölnlycke Z-Flo ist ein vielseitiges Produkt mit zahlreichen Anwendungsmöglichkeiten. Zu den am weitesten verbreiteten Anwendungsindikationen auf der IPS zählen die Prävention von Druckulzera am Hinterkopf sowie die Lagerung der Patienten. Ausserdem haben sie sich als effektiver Schutz vor Ulzera bei Bauchlage der Patienten bewährt.

Reduktion von Druckulzera am Hinterkopf um **87,7 %**¹

Prävention von Druckulzera am Hinterkopf

In einer Studie wurde die klinische Wirksamkeit des Mölnlycke Z-Flo Fluidized Positioner in der Anwendung zur Verringerung des Auftretens von Druckulzera am Hinterkopf auf der IPS beurteilt. In der Studie wurden auch Patienten unter ECMO miteingeschlossen, bei denen die häufige Entlastung und Umlagerung des Kopfes eine Herausforderung darstellt.¹

Mit dem Mölnlycke Z-Flo wird die Kontaktoberfläche vergrössert und der Kopf umgelagert – so wie im Versorgungsstandard für die Prävention von Druckulzera vorgesehen.



Drehen und Umlagern

Der Mölnlycke Z-Flo Fluidized Positioner behält seine Form – und hält den Patienten im Laufe der Zeit in der gewünschten Position.

Zudem kann der Anwender den Winkel der Drehung durch den Fluidized Positioner bestimmen – von einer Mikrodrehung bis hin zu Drehungen mit grossem Winkel.

In einer Studie wurde der Mölnlycke Z-Flo Fluidized Positioner mit herkömmlichen Lagerungskissen verglichen. Die Ergebnisse zeigten eine statistisch signifikante Differenz zwischen den beiden Lagerungshilfen bei der Aufrechterhaltung der Position.²



Proving it every day.

Mölnlycke liefert innovative Lösungen für die Wundversorgung, die die Operationsicherheit und -effizienz verbessern sowie vor Druckulzera schützen.

Unsere Lösungen tragen zu besseren Behandlungsergebnissen bei und werden von klinischen und gesundheitsökonomischen Nachweisen gestützt.

Mit allem, was wir tun, verfolgen wir einen Zweck: medizinische Fachkräfte dabei zu unterstützen, ihr Bestes zu geben. Und wir sind bestrebt, das jeden Tag unter Beweis zu stellen.

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Grösse	Artikel	Beschreibung	Stück/Packung	Stück/Karton*
Erwachsene					
14 01 001	28 x 56 cm	Positionierungshilfe	klein ohne Bezug	1	1
14 01 003	41 x 76 cm	Positionierungshilfe	mit Laschen ohne Bezug	1	1
14 01 005	65 x 90 cm	Positionierungshilfe	gross ohne Bezug	1	1
14 01 007	30 x 51 cm	Positionierungshilfe	ohne Bezug	1	8
14 01 008	30 x 51 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	8
14 01 011	41 x 76 cm	Positionierungshilfe	ohne Bezug	1	1
Pädiatrie/Neonatologie					
14 00 200	30 x 51 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	6
14 00 206	41 x 61 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	6
14 00 213	51 x 76 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	4
14 00 224	152 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	6
14 00 233	18 x 18 cm	Positionierungshilfe	mit Bezug (waschbar)	1	18
Bezüge					
14 00 201	30 x 51 cm	Bezug	waschbar	1	50
14 00 202	30 x 51 cm	Bezug	Einmalgebrauch	1	50
14 00 225	150 cm	Bezug	waschbar	1	50

*Mindestbestellmenge Z-Flo

Literatur: 1. Barakat-Johnson M et al. Evaluation of a fluidised positioner to reduce occipital pressure injuries in intensive care patients: A pilot study. Int Wound J. 2018;1-9.
2. Kapp S, Gerdtz M, Gefen A, Prematunga R, Santamaria N. An observational study of the maintenance of the 30°side-lying lateral tilt position among aged care residents at risk of developing pressure injuries when using the standard care pillow and a purpose-designed positioning device. Int Wound J. 2019.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.ch

Mölnlycke Health Care AG, Brandstrasse 24, 8952 Schlieren, Schweiz. Tel.: +41 44 744 54 00, info.ch@molnlycke.com
Marke, Name und Logo von Mölnlycke sind global eingetragene Marken einer oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Gruppe. Z-Flo ist eine Marke von Mölnlycke Health Care ©2023 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.
HQIM003597

